

Kurzanleitung:

LEPU Medical SARS-CoV-2
Antigen Rapid Test

Nasenabstrich nur **im vorderen** Nasenraum (**2 - 2,5cm**)


- > kinderleicht
- > nicht-invasiv

-> Bitte beachten Sie die Lagertemperatur von 4 - 30 Grad und die Umgebungstemperatur bei der Durchführung des Tests von 15 - 30 Grad.

-> Unmittelbar **vor der Durchführung** des Tests **schnäuzen!**


Anleitung Schritt 1:

Schutzabdeckung des Klebestreifens entfernen

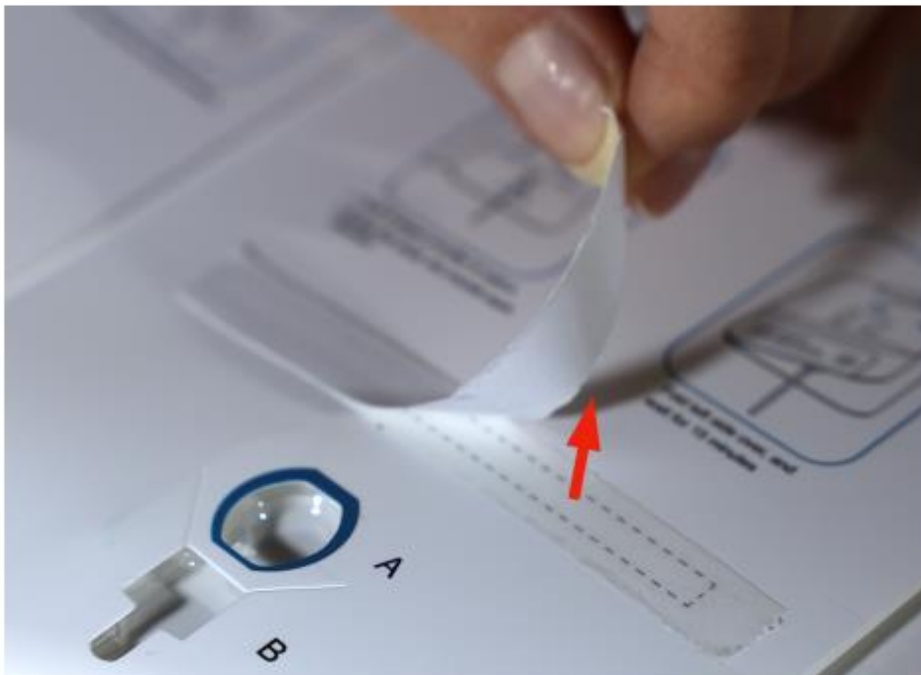


Anleitung Schritt 2:

Stäbchen 2 - 2,5 cm in die Nase einführen und an der Innenfläche jedes Nasenlochs mind. 5 Sekunden drehen

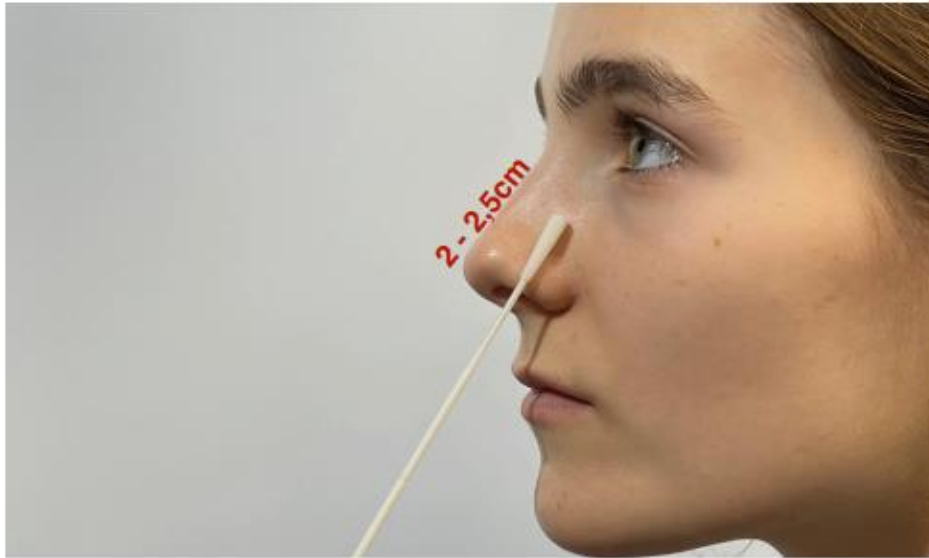


Anleitung Schritt 3:

Wattestäbchen unter Lasche in Vertiefung schieben

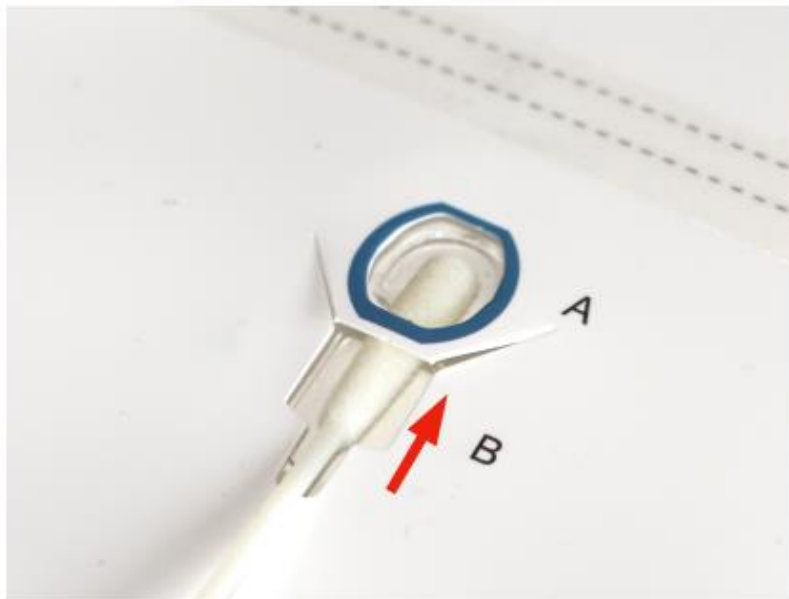

Anleitung Schritt 4:

6 Tropfen der Pufferlösung auf Stäbchen in Vertiefung A eintropfen

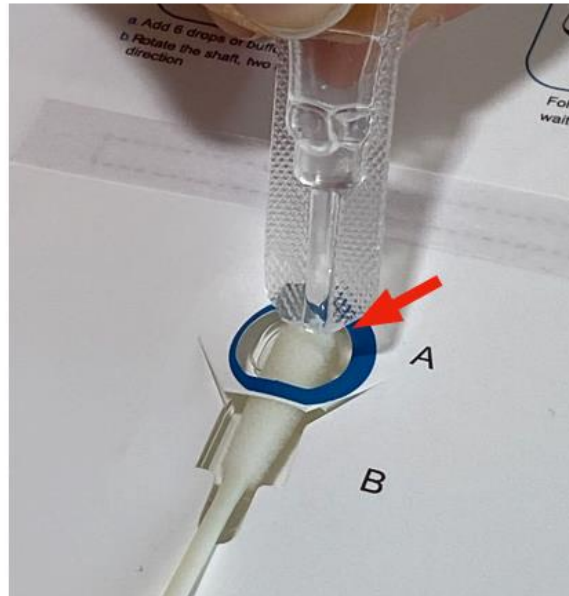

Anleitung Schritt 5:

Wattestäbchen 2x in jede Richtung drehen



Anleitung Schritt 6:

beide Seiten auf dem Klebestreifen fest
zusammendrücken




Anleitung Schritt 7:

Nach **15 Minuten Wartezeit** ist das Testergebnis auf der Vorderseite sichtbar.

Ergebnisinterpretation:

Positiv:

zwei rote Striche

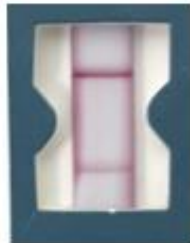

Negativ:

oben rot




Ungültig:



kein Strich



unten rot

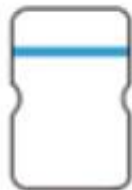

oben blau



oben blau
unten rot

Bitte lesen Sie noch die beiliegende detaillierte Gebrauchsanleitung durch!